

Uputstvo za WHITE smile Light Whitening AC

Uvod

Light Whitening AC

dvokomponentni sistem pakovan u dva šprica, za beljenje obojenih zuba u stomatološkoj ordinaciji brzo i jednostavno – najčešće u jednoj poseti.

Light Whitening AC

je dostupan u varijanti: 32 % Vodonik peroksid za lampu. Gel je predviđen isključivo za upotrebu u stomatološkoj ordinaciji. Mešanjem dve komponente gel postaje aktivan za beljenje. Vreme tretmana je determinisano individualno u odnosu na senzitivnost zuba i očekivanu boju zuba. Gel žute boje se aplikuje direktno iz kanile za mešanje na zub, viskoznost mu je takva da sprečava curenje i mogućnost akcidenta u dodiru sa oralnim tkivom. Upotrebljavani gel se lako može zatvoriti i sa novom kanilom za mešanje se može koristiti za novi tretman.

Indikacije za upotrebu

Light Whitening AC

se koristi za brzo, medicinski indikovano beljenje za diskoloracije zuba, vitalnih i avitalnih, koji se ne mogu izbeliti sa profesionalnim čišćenjem zuba da bi se dobila prirodna ili normalna boja zuba. Medicinsko beljenje zuba je indikovano kod diskoloracija zuba.

Upozorenje

Light Whitening AC

gel EXTRA je veoma reaktivan jer sadrži veliku koncentraciju vodonik peroksida. Da bi se izbegao kontakt sa kožom i očima preporučuje se upotreba rukavica i zaštitnih naočara. Ukoliko gel dođe u kontakt sa kožom, odmah isprati mlazom tekuće vode. Na zahvaćenom mestu mogu se pojaviti bele mrlje i može se pojaviti osećaj pečenja. Simptomi bi trebalo da nestanu nakon 30 – 60 minuta. Ukoliko gel dođe u kontakt sa očima, odmah isprati vodom i potražiti pomoć lekara. Bilo koju stomatološku rekonstrukciju (krune, mostovi, ispuni i slično) odložiti za dve do tri nedelje nakon beljenja, kako bi se boja nove nadoknade odredila prema novo uspostavljenoj boji zuba. Molimo obratite pažnju da je adhezivno svojstvo zubnog tkiva umanjeno 2-3 dana nakon postupka beljenja. Ne izvodite postupak beljenja pod dejstvom anestezije. WHITEsmile ne preporučuje upotrebu Light Whitening AC gel-a kod pacijentkinja koje su u drugom stanju, doje bebu i koji su mlađi od 16 godina.

1. Priprema

Posle kliničkog pregleda potrebno je odrediti trenutnu boju zuba pacijenta. Preporučuje se da se postupak započne profesionalnim čišćenjem zuba. Korišćenjem držača za usne, retraktorom za usne ili sličnim instrumentom treba odvojiti usne kako bi zubi bili potpuno dostupni. Ukoliko je potrebno, postaviti vaterolne i premazati usne pacijenta vazelinom.

2. Aplikacija WHITEsmile GINGIVA PROTEKTOR-a

Postaviti kanilu na vrh šprica u kome se nalazi WHITEsmile GINGIVA PROTEKTOR. Pažljivo osušiti gingivu kako bi se obezbedilo prijanjanje i učvršćivanje gela koji štiti gingivu tokom postupka beljenja. Naneti gel GINGIVA PROTEKTOR na gingivu i prekriti 3 – 4 mm gingive i 0,5 – 1-mm zuba. Zatim izvršiti polimerizaciju gela UV lampom u trajanju od 30 – 40 s, pomerajući lampu kružnim pokretima iznad materijala. Umesto WHITEsmile protektora gingive može se koristiti i koferdam.

Savet:

Gel za zaštitu gingive može se takođe polimerizovati i WHITEsmile lampom za beljenje.

Postupak beljenja

Postaviti kanilu za mešanje na odgovarajuće mesto dvostrukog šprica u kome se nalazi gel Light Whitening AC. Nanesite gel za beljenje direktno na površinu zuba. (Ukoliko se vrši beljenje jednog pojedinačnog zuba, GINGIVA PROTEKTOR gel i gel za beljenje se mogu naneti i lingvalno). Debljina sloja nanetog gela treba da je 1 -2-mm. (Izbegavati kontakt sa ostalim delovima tela i garderobom) Ostaviti gel da ostoji oko 10 – 15 min. Skratiti vreme stajanja gela ukoliko se pojavi osetljivost. Light Whitening AC se može aktivirati i upotrebom lampe za polimerizaciju (10 s je dovoljno po svakom zubu). Posebne lampe za beljenje i laseri se takođe mogu koristiti (proveriti u uputstvu proizvođača o načinu upotrebe lampe u ove navedene svrhe). Materijal se tada brže razgrađuje, pa se postupak može skratiti na 10 min.

Ukloniti gel sa zuba korišćenjem aspiratora – ne ispirati - a zatim naneti novi sloja gela. Ovaj postupak se može ponoviti 3 puta.

Nakon poslednjeg postupka ukloniti gel aspiratorom a zatim ispirati.

Zatim se mogu ukloniti GINGIVA PROTEKTOR i držač za usne. Na kraju pacijent može da ispere usta toplom vodom.

Upotreba lampe za beljenje

Postavite lampu blizu pacijentovih usta nakon aplikacije gela i uključite. Ukoliko se koristi WHITEsmile lampu za beljenje obavezna je upotreba zaštitnih naočara za pacijenta i stomatologa. Prilikom korišćenja lampi za beljenje drugog proizvođača poštujujte uputstva data od strane proizvođača.

Nakon manje od sata Vaš pacijent može da uživa u svom novom blistavom belom osmehu – zahvaljujući Vašem tretmanu.

Boja zuba nakon postupka beljenja se takođe treba odrediti i čuvati u dokumentaciji pacijenta. Nakon tretmana aplikovati lak sa fluorom na zube. Postupak možete završiti i umanjiti mogućnost nastajanja osetljivosti tako što ćete na zube aplikovati WHITEsmile AFTER BLEACHING penu i ostaviti da deluje 10 – 15 min. Preporučite svom pacijentu WHITEsmile WHITENING pastu za zube sa 30% Xilitola za održavanje rezultata beljenja i zaštitu zuba.

Neželjeni efekti

Ukoliko pacijent oseti žarenje i pečenje u ustima, postupak treba odmah prekinuti i gel za beljenje ukloniti. Nakon tretmana osetljivost se može umanjiti korišćenjem WHITEsmile AFTER BLEACHING

pene. Iz sigurnosnih razloga pacientu takođe treba staviti zaštitne naočare. Za više informacija molimo Vas obratite se WHITEsmile opštim uputstvima za stomatologe.

Čuvanje i rok trajanja

Light Whitening AC potrebno je čuvati na hladnom mestu ili frižideru (4 - 12° C). Rok trajanja označen na pakovanju odnosi se samo na materijal koji ja adekvatno skladišten i čuvan. Ne zamrzavati gel i držati dalje od toplote i sunčeve svetlosti.